


SAFLOHYAL 10 ml PL

Nome:	SAFLOHYAL 10 ml PL
Codice:	20FG962
Tipo Carta:	USOMANO 60gr/mq bianco
F.to carta:	100x150 mm.
Piega:	SI finito 24 mm
Stampa:	1 colore BLU REFLEX

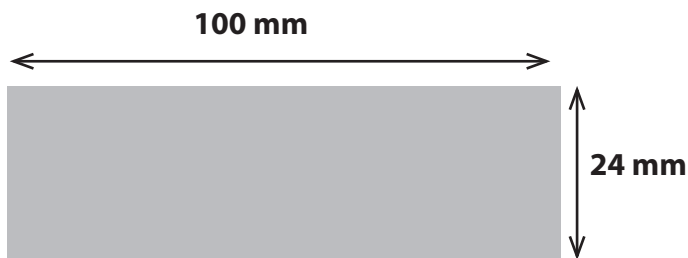

3 bozza
del
11-09-2018

Krople do oczu Bez konserwantów

Przed zastosowaniem preparatu należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki.

1. Co to są krople do oczu SafloHyal™ i w jakim celu się je stosuje

Krople do oczu SafloHyal™ są wyrobem medycznym o działaniu przeciwzapalnym (hamują rozwój procesu zapalnego). Wskazane są dla dzieci i dorosłych w leczeniu objawowym (świądu, uczucia ciała obcego, zaczerwienienia, itp.) stanów zapalnych powierzchni oka, takich jak: dyskomfort w oku, zapalenie brzegów powiek i zapalenie spojówek.

Krople do oczu SafloHyal™ zawierają specjalistyczny, termowrażliwy kopolimer, który w kontakcie z powierzchnią oka tworzy żel, zapewniając długotrwały efekt nawilżający i powlekający.

Technologia OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser – system dozowania kropli okulistycznych) to innowacyjna metoda aplikacji, która zapewnia całkowitą sterylność kropli, bez użycia konserwantów.

2. Co należy wiedzieć przed zastosowaniem kropli do oczu SafloHyal™

Nie stosować kropli do oczu SafloHyal™ w przypadku alergii lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu (wymienionych w punkcie 6).

3. Jak należy stosować krople do oczu SafloHyal™

- Przed zastosowaniem preparatu należy umyć ręce.
- Zakraplać 1-2 krople do każdego oka 2-3 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu dozownika z okiem.

4. Środki ostrożności

- Przypadki wapienia rogówki związane ze stosowaniem kropli do oczu zawierających fosforany występują bardzo rzadko u osób z poważnymi uszkodzeniami powierzchni oka. W przypadku keratopatii wstążkowej lub odkładania złogów wapienia w rogówce, przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.
- Bezpośrednio po zakropieniu może wystąpić nieznaczne, przemijające uczucie swędzenia.
- Krople oczne, nie połykać.
- Przed zastosowaniem sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone.
- Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Data ważności odnosi się do preparatu w nieuszkodzonym i odpowiednio przechowywanym opakowaniu.

5. Jak przechowywać krople do oczu SafloHyal™

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie stosować produktu po upływie 60 dni od daty pierwszego otwarcia.
- Po użyciu dokładnie zamknąć butelkę.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła.

6. Pozostałe informacje

Skład: Glukuronid enoksolonu, sól sodowa kwasu hialuronowego 0,10%, kopolimer PEG/PPG, wodorotlenek potasu, jednosasadowy fosforan sodu, dwuzasadowy fosforan sodu, chlorek sodu, woda demineralizowana.

Opakowanie

Butelka 10 ml z dozownikiem OSD.

SafloHyal™ jest wyrobem medycznym zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG

Wyłączny dystrybutor na Polskę:

DMG Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
tel. (+48) 44 734 42 62
www.dmgpolska.eu



Italdevice srl
via Laurentina Km. 26,700
00071 Pomezia (Rome) - Italy
www.italdevice.com

Dystrybutor:



Via Laurentina Km 26,700
Pomezia-Roma-Italy
www.dmgit.com

Wyprodukowano we Włoszech

CE
1370

STERILE A