

## Krople do oczu chroniące rogówkę Bez konserwantów

**Przed zastosowaniem produktu należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki.**

### 1. Co to są krople do oczu Oftaxhyal® i w jakim celu się je stosuje?

Różnego rodzaju urazy: mechaniczne, chemiczne jak i fizyczne, mogą naruszać integralność powierzchni rogówki. W nabłonku rogówki znajdują się liczne zakończenia nerwowe, których zadaniem jest utrzymanie prawidłowej morfofunkcjonalnej integralności powierzchni rogówki.

Krople do oczu Oftaxhyal® zawierają kwas hialuronowy,  $\alpha$ -glicerylofosforylocholinę i D-pantenol, które wspomagają procesy naprawy zakończeń nerwowych i nabłonka rogówki.

Krople do oczu Oftaxhyal® zwiększają objętość i stabilność filmu łzowego. Witaminy z grupy B ( $B_{12}$  i  $B_6$ ) zawarte w kroplach wzmacniają ochronę powierzchni oka, ograniczając niekorzystne oddziaływanie czynników zewnętrznych i zabiegów chirurgicznych.

Krople do oczu Oftaxhyal® są wyrobem medycznym wskazanym do powlekania i ochrony rogówki oraz do leczenia dyskomfortu i objawów bólowych oka, spowodowanych uczeniem ciała obcego, czynnikami zewnętrznymi, zabiegami chirurgicznymi i urazami, które mogą ustąpić pod wpływem leczenia miejscowego.

Krople do oczu Oftaxhyal® wspomagają procesy reepitelizacji i neuroregeneracji rogówki.

Technologia OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser – system dozowania kropli okulistycznych) to innowacyjna metoda aplikacji, która zapewnia całkowitą sterylność kropli, bez użycia konserwantów.

### 2. Co należy wiedzieć przed zastosowaniem kropli do oczu Oftaxhyal®?

- Nie stosować kropli do oczu Oftaxhyal® w przypadku alergii lub stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu (wymienionych w punkcie 6).

### 3. Jak stosować krople do oczu Oftaxhyal®?

- Przed zastosowaniem kropli do oczu Oftaxhyal® nie ma konieczności zdejmowania soczewek kontaktowych.
- Przed zastosowaniem preparatu należy umyć ręce.
- Zakraplać 1-2 krople do każdego oka 2-3 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu dozownika z okiem.

### 4. Środki ostrożności

- W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Przed zastosowaniem sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone.
- Nie stosować produktu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin ważności odnosi się do produktu w nieuszkodzonym i prawidłowo przechowywanym opakowaniu.
- Krople oczne, nie połykać.

### 5. Jak przechowywać krople do oczu Oftaxhyal®?

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie 60 dni od daty pierwszego otwarcia.
- Po użyciu dokładnie zamknąć butelkę.
- Nie zanieczyszczać środowiska zużytym opakowaniem.
- Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30 °C.

### 6. Pozostałe informacje

**Skład:** Sól sodowa kwasu hialuronowego,  $\alpha$ -glicerylofosforylocholina, witamina  $B_{12}$  (cyjanokobalamina), witamina  $B_6$  (chlorowodorek pirydoksyny), D-pantenol, izotoniczny roztwór buforowy o pH 7,2.

**Opakowanie:** Butelka 10 ml z dozownikiem OSD.

Aktualizacja: 00 10/2022

#### Wyłączny dystrybutor na Polskę:

DMG Polska Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 65/79  
00-697 Warszawa  
tel. (+48) 44 710 86 99  
www.dmgpolska.eu

Wyprodukowano we Włoszech



DMG Italia srl  
via Laurentina Km. 26,700  
Pomezia (Rzym) – WŁOCHY  
www.dmgit.com



STERILE A

CE  
0373

30FG168 5-15/6/2023